



Extension kit voor 2 cm meer zitbreedte tussen de armleuningen.



Stap 1: Zwenk de armleuningen naar achteren en demonteer deze van de rolstoel.



Stap 2: Vervang de rotatieassen en plaats per armleuning twee extra opvulringen.



Stap 3: Zet de armleuningen weer goed vast.



Stap 4: Demonteer de adapters voorop de zitbuis.



Stap 5: Vervang het bevestigingsmateriaal en plaats per zijde twee extra opvulonderdelen.



Stap 6: Zet de adapters weer goed vast en plaats de armleuningen terug.