

Le fauteuil peut être déplié en position debout (voir page 60 au manuel) ou couchée.



Veillez à ne pas vous pincer les doigts ou les membres lors du dépliage du Smart Chair.

1

Rabattez le repose-pieds et tirez sur le verrou de sécurité pour déverrouiller le siège.



2

En faisant pivoter le dossier pour le dégager du siège, le fauteuil peut maintenant être entièrement déplié.

Vous entendrez un clic lorsque le fauteuil déplié sera verrouillé.



3

Rabattez ensuite les accoudoirs et désactivez les roues anti-basculement (voir page 22 au manuel).

Le cas échéant: mettez le fauteuil en mode conduite (voir page 64 au manuel), remplacez la batterie (voir page 70 au manuel) le joystick (voir page 65 au manuel) et les coussins d'assise et de dossier.

Réglez les accoudoirs et installez vos accessoires si nécessaire.



Activez le fauteuil. Le Smart Chair Horizon est prêt à vous accompagner partout!



Lisez d'abord le manuel avant d'utiliser le fauteuil.





tip Vous pouvez réduire le poids du Smart Chair en retirant la batterie, le joystick, ainsi que les coussins du siège et du dossier. Vider le compartiment de rangement du dossier et retirer tous les accessoires est également utile.

! Faites en sorte que vos mains et membres ne se coincent pas lors du dépliage de votre fauteuil.

1

Éteignez le fauteuil (voir page 69 au manuel), repliez les accoudoirs et repliez les roues anti-basculement (voir page 64 au manuel).




Déverrouillez le fauteuil en appuyant sur le levier de déverrouillage.

Repliez ensuite complètement le fauteuil en abaissant le dossier. Vous entendrez un clic lorsque le fauteuil sera verrouillé.

2

3

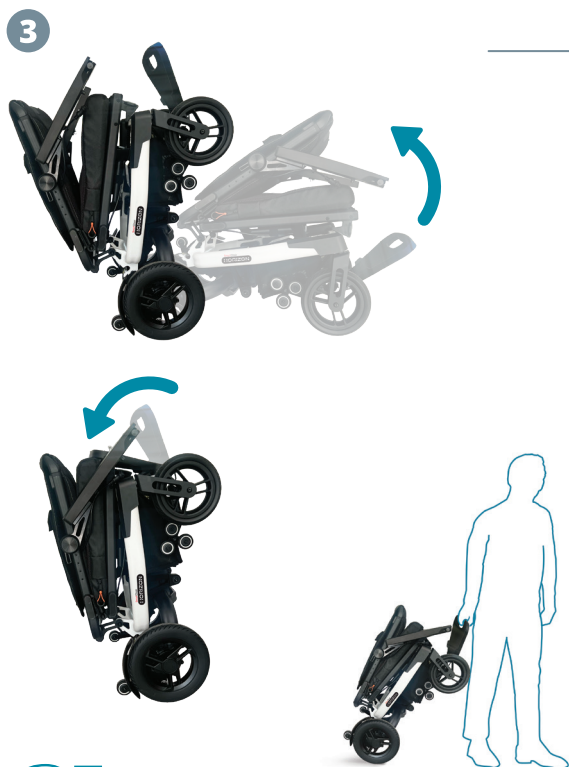

Vous pouvez utiliser l'encoche du repose-pieds pour redresser le fauteuil.

Repliez le repose-pieds et abaissez légèrement les accoudoirs.

✓ Le Smart Chair Horizon peut à présent se ranger de manière compacte.

✓ Vous pouvez aussi tirer le Smart Chair comme un chariot grâce aux roues anti-bascule. Pour ce faire, déplacez les leviers de roue libre vers le haut à l'étape 1 (voir page 64 au manuel).

✓ Utilisez le Smartroll pour faire rouler facilement votre Horizon dans le coffre (voir page 73 au manuel).

! Ne soulevez pas le Smart Chair Horizon tout seul s'il est trop lourd pour vous.

! Ne soulevez pas le fauteuil en tenant les parties mobiles ou en matière plastique. Reportez-vous aussi aux consignes de sécurité de transport du chapitre 1 au manuel.