



1

Dépliez le(s) palette(s) et faites pivoter le dossier en haut.



2

2

Déverrouillez le fauteuil en déplaçant les boutons coulissants sur le tube de siège arrière l'une vers l'autre.



3

3

Abaissez ensuite le siège. Vous entendez un clic lorsque le fauteuil déplié sera verrouillé.



4

4

Montez l'unité de commande avec la manette et branchez la prise dans le connecteur.



1

Éteignez le fauteuil, soulevez le dossier et, si nécessaire, retirez l'unité de commande avec manette.



2

Déverrouillez le fauteuil en déplaçant les boutons coulissants sur le tube de siège arrière l'une vers l'autre.



3


Soulevez ensuite le cadre avant sous le siège. Vous entendrez un déclic lorsque le fauteuil plié sera verrouillé.



4

Repliez le(s) palette(s) et abaissez le dossier si nécessaire.

**Skyline**  
votre guide en travel mobility

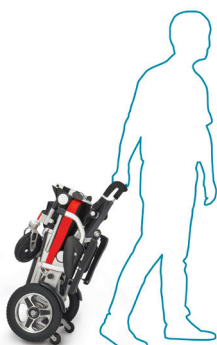

**SmartChair**  
**JetSet**

votre guide en travel mobility