

1

Déverrouillez le fauteuil à l'aide du levier et laissez les roues avant rouler vers l'avant.



2



Dépliez complètement le fauteuil en soulevant le dossier. Vous entendrez un clic lorsque le fauteuil est verrouillé. Faites pivoter la partie supérieure du dossier vers l'arrière.



3




3

Dépliez ensuite les roulettes anti-basculement, abaissez le repose-pieds et tournez la manette.



Activez le fauteuil. Le Smart Chair Travel est prêt à vous accompagner partout!

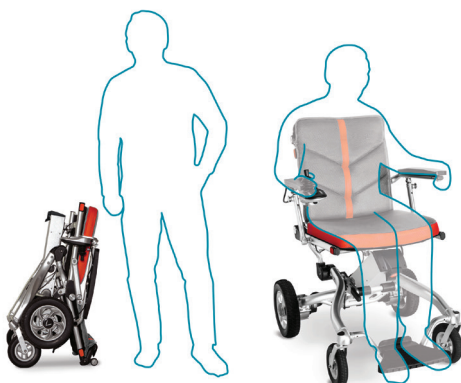



1

Éteignez le fauteuil et réglez les accoudoirs dans la position la plus basse. Repliez les roulettes anti-basculement et faites pivoter la partie supérieure du dossier vers l'avant.



2

Déverrouillez le fauteuil en tirant sur le câble et faites pivoter le dossier vers l'arrière.



3

Inclinez ensuite l'ensemble du fauteuil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se redresse indépendamment. Vous entendrez un clic lorsque le fauteuil est verrouillé.

4

Tournez l'unité de commande et repliez le repose-pieds.



Le Smart Chair peut à présent se ranger de manière compacte.




Vous pouvez aussi tirer le Smart Chair au niveau du tuyau dorsal comme un chariot grâce aux roues anti-bascule.



Installez le SmartRoll en option pour une réduction de poids de 40%. Votre fauteuil ne pèse que 14 kg lorsque vous le soulevez dans le coffre de votre voiture.



4

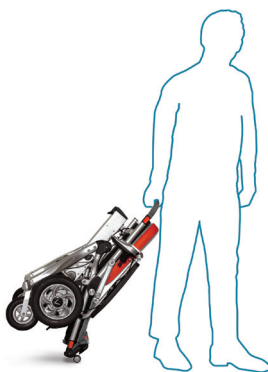

SmartChair Travel

Skyline

Vous pouvez visionnez en vidéo le processus de pliage et dépliage sur le site www.skylinemobility.com

your guide in travel mobility