

ALFA

Design by
**PORSCHÉ DESIGN
STUDIO**

Enjoy mobility.



SNELSTART



Vouw de rollator uit en duw de zitting naar beneden tot u een "klik" hoort.

De zitting is nu vergrendeld.



Met de remhendels kunt u de rollator zowel afremmen (naar boven) als blokkeren (naar beneden).



Met een druk op de knop kunt u de gewenste hoogte van de handvatten instellen. *(Zie tabel in handleiding voor een indicatieve hoogte in relatie tot lichaamslengte.)*



Verstel de rugsteun naar een voor u comfortabele hoogte.