

1



Trek aan de rode hendel om het vouwmechanisme te ontgrendelen.

2



Klap de scootmobiel uit door het stuur naar voren te kantelen.

3



Vergrendel de scootmobiel door de zitting omhoog te trekken en de stuurkolom naar voren te duwen. U hoort dan een klik.




Klap de rugleuning omhoog en de BRIO vouwscoot is klaar om u rond te leiden!



**BRIO**  
vouwscoot

# 1

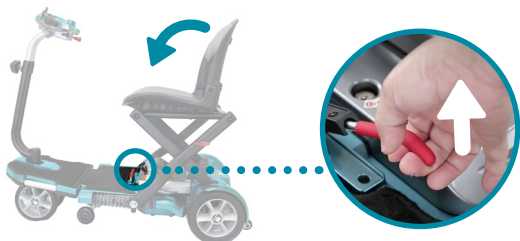

Klap de rugleuning neer en trek aan de rode hendel om de scootmobiel te ontgrendelen.

# 2



Klap de scootmobiel in door het stuur naar achteren te kantelen.

# 3



Vergrendel het vouwmechanisme door de stuurkolom naar beneden te duwen. U hoort dan een klik.



Kantel de scootmobiel zodat u de BRIO gemakkelijk als een verrijdbare koffer kunt verplaatsen.



**BRIO**  
vouwscoot