

flexyfoot

Zelfverzekerdheid Veiligheid Stijl

Gebruik van uw Flexyfoot Wandelstok

Lees en bewaar alstublieft deze instructies.

De telescopische Flexyfoot Wandelstok dient voor gebruik op de juiste hoogte te zijn ingesteld (1 Meet de afstand van de grond tot aan uw pols wanneer u rechtop staat in uw dagelijkse schoeisel met uw armen ontspannen langs uw zijde). (2 Draai de zwarte manchettering open, stel de gewenste hoogte middels de drukknop in, controleer of de pin vastzit en draai de zwarte manchettering weer dicht.

De opvouwbare Flexyfoot Wandelstok wordt ingeklapt geleverd. (3 Wanneer u de onderdelen simpelweg recht houdt, zal de stok uit zichzelf samentrekken. (4 Pas de hoogte aan zoals bij de telescopische Flexyfoot Wandelstok.

De Flexyfoot Hiking Pole is gemonteerd met een Flexyfoot Dop om het toepasbaar te maken voor de meeste omstandigheden, maar is niet bedoeld in erg modderig of ruw (rotsachtig) terrein (let alstublieft op: het is geen vervanging van een wandelstok en de Hiking Poles zijn niet getest naar de internationale standaard voor capaciteit m.b.t. gebruikersgewicht en bestendigheid). Het multifunctionele handvat kan in hoge- en lage positie worden gebruikt (4). (5 Houd de bovenste buis vast en draai de buis eronder tegen de klok in om de gewenste hoogte in te stellen. (6 Vergrendel door de onderste buis bij de Flexyfoot Dop vast te houden en kloksgewijs te draaien totdat deze vastzit.

Vervanging van het "voetstuk"

- Vervang het "voetstuk" wanneer het loopvlak is afgesleten tot de 'slijtage markeringen' of wanneer het beschadigd is (9).
- Verwijder door simpelweg het oude "voetstuk" los te draaien en van de "houder" te trekken (7) en het vervangende "voetstuk" erop te plaatsen. Draai het vervangende "voetstuk" in de "houder" totdat het vrij roteert en druk dan het "voetstuk" aan totdat het klikt (8).

Flexyfoot accessoires

Flexyfoot Extra Voor een actief, volledig steunend persoon zoals een krulgebruiker met bijvoorbeeld een amputatie, kan Flexyfoot worden aangepast in een Flexyfoot Extra. Voeg simpelweg de twee bijgeleverde weerstandsringen toe aan iedere oranjekeurige balg-inkeping (10). Deze bieden langdurig meer weerstand.

Flexyfoot Spikes De Flexyfoot Spikes met roestvrijstalen tanden biedt extra grip in sneeuw of op ijs (11) en past op het vernieuwde Flexyfoot loopvlak (met cirkels). Het wordt geleverd met beschermingsdop voor gebruik binnenshuis.

Flexyfoot Reserve "voetstuk" Een reserve "voetstuk" kan afzonderlijk worden aangeschaft in geval het bestaande loopvlak (zowel oud als nieuw ontwerp) versleten of beschadigd is.

Ze zijn verkrijgbaar online of bij de retailers van Skyline Mobility.

Waarschuwingen

- Maximaal gebruikersgewicht telescopisch & opvouwbare wandelstok: 130kg (geldt niet voor de Flexyfoot Hiking Poles).
- Flexyfoot is bruikbaar voor de meeste mensen in de meeste omgevingen. De mate van grip van het "voetstuk" is afhankelijk van de ondergrond, het type hulpmiddel en de wijze van gebruik. U dient extra voorzichtig te zijn in natte en gladde omstandigheden.
- Let op: Flexyfoot wordt geleverd in twee onderdelen – de "houder" die wordt bevestigd aan uw hulpmiddel en het "voetstuk" dat in de houder geschroefd wordt.
- Controleer regelmatig het loopvlak op slijtage en vervang indien de slijtage reikt tot aan de 'slijtage markeringen' (9). Vervang direct indien het oranjekeurige schroefdraad of de "balgen" beschadigd zijn of wanneer het "voetstuk" of hulpmiddel los in de "houder" zit.

- Gebruik altijd de juiste maat "houder" voor uw hulpmiddel. Volg de meetinstructies online of op de Flexyfoot verpakking.
- Vervang de "houder" bij elke derde vervanging van het "voetstuk" (drie betekent inclusief de originele).
- De "balgen" zullen iets zachter worden na verloop van tijd en zullen hierdoor ongeveer 6 mm in hoogte verlagen.
- Gebruik voor reiniging enkel wat zeepwater.



Fabrikant: **Flexyfoot Ltd** Postbus 1390, Woking, Surrey, GU22 2LB, United Kingdom
Importeur Benelux: **Skyline Mobility BV** Gildeweg 22, 2632 BA Nootdorp, Nederland
T +31 (0)15 82 00 320 E info@skylinemobility.com I www.skylinemobility.com

Flexyfoot is beschermd door patentrecht en geregistreerd design
Flexyfoot Nederlandse instructies voor Wandelstok 540 - Web 01 Datum van uitgifte 2016