

Gebruikershandleiding Twin Paraplustok



Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door en volg de instructies nauwkeurig op!

Voorwoord

Onze Twin Paraplustokken zijn geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Ze bieden de onderste ledematen assistentie bij de coördinatie en steun bij het staan en lopen; ongeacht het weer. De Twin Paraplustok is namelijk een wandelstok en paraplu in één! Lees voor het eerste gebruik de veiligheidsvoorschriften aandachtig door!


1. Algemene productinformatie

Voor ieder weertype een oplossing dankzij de multifunctionele parapluwandelstok. Mocht het gaan regenen, klapt u de paraplu open en trekt u de wandelstok er met een simpele beweging uit. Zo kunt u uw wandeling droog voortzetten zonder een tweede loophulpmiddel nodig te hebben. Tot die tijd steunt u onopvallend op uw paraplustok. Bij mooi weer laat u de paraplu thuis en gaat u op pad met de slanke maar sterke wandelstok. Of gebruikt u het scherm juist als parasol tegen de felle zon. De paraplu is voorzien van een speciale stormbeveiliging en kan dus tegen flinke windstoten en hoosbuien. Alle producten van Ossenberg voldoen aan de Europese richtlijnen voor Medische Hulpmiddelen. Daarnaast is de Duitse fabrikant gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13485 & 9001.



2. Veiligheidsvoorschriften

- Vraag uw winkelier/zorgprofessional om advies hoe de paraplustok te gebruiken!
- Uw winkelier/zorgprofessional stelt graag de juiste functionele en ergonomische hoogte voor u in! (Ons algemene advies: www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/paraplustok/juiste-hoogte/)
- Let op: het maximale gebruikersgewicht is 100 kg. Een overschrijding van het toegestane lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren!
- Het is niet toegestaan om tassen, zakken of andere voorwerpen aan uw paraplustok te hangen!
- Het is niet toegestaan om mechanische wijzigingen aan te brengen. Hierdoor kan de productveiligheid en -aansprakelijkheid van de paraplustok niet meer worden gegarandeerd. Om dezelfde reden dient u uitsluitend originele onderdelen en accessoires te gebruiken!
- Gebruik de paraplustok alleen waarvoor deze bedoeld is. Gebruik het product dus niet om bijvoorbeeld iets op te tillen of te verschuiven. Misbruik de paraplustok niet als hulp voor het indrukken van liftknoppen of lichtsakelaars!
- De ondergrond is van cruciaal belang voor een veilige grip van uw paraplustok. Deze is sterk verminderd bij losse ondergrond zoals grind, zand of bladeren. Dit geldt ook bij sneeuw, ijs en gladheid! Wees uiterst voorzichtig op natte of ijzige ondergrond, zelfs vochtige tegels kunnen een onverwachts risico vormen. Tip: Schoenspikes en metaalnagels onder de dop van uw paraplustok zorgen voor meer grip bij gladde situaties. Voorkomen is altijd beter dan genezen!
- Wees extra alert bij oneffenheden of gaten in de grond. Uw steun kan onverwachts wegvallen of wegglijden. Let op: bij onvoldoende licht zijn oneffenheden nauwelijks zichtbaar. Houd hier rekening mee!
- Ook matten of losse vloerbedekking kunnen een struikelblok vormen waardoor de paraplustok kan wegglijden!
- Zorg bij het instellen van de hoogte dat de complete knop uit het gat steekt. U hoort dan een klik!
- De hoogter verstelling wordt blootgesteld aan een zekere mate van slijtage. Uitgesleten gaten kunnen een veilige vergrendeling van de drukknop niet meer garanderen!
- Alle verbindingen moeten goed vastzitten! Gelieve dit vóór elk gebruik te controleren!
- De rubberen antislipdop is slijtage-gevoelig. Vervang dit onderdeel indien nodig!
- Waarschuw uw winkelier/zorgprofessional wanneer de paraplustok zichtbare beschadigingen vertoont!
- De paraplustok bevordert uw mobiliteit, maar wees continu bewust van het feit dat uw conditie en mobiliteit in het algemeen verminderd zijn!

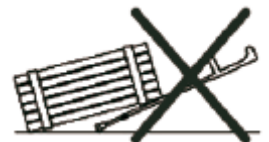

3. Handelingen

Hoogte verstellen

De paraplustok is met één druk op de knop verstelbaar, zodat u altijd de gewenste hoogte kunt instellen. In 5 stappen kunt u een hoogte van 87 tot 95 cm bereiken. De wandelstok is 2 cm korter als u deze uit de paraplu haalt (85-93 cm). Let op: draai eerst de zilverkleurige manchetring open alvorens u de knop indrukt en de paraplustok wilt verstellen. Trek de buis uit voor een langere instelling en duw de buis terug voor een kortere instelling. Bij een juiste boring van de knop in het gat hoort u een duidelijke klik. Draai de manchetring weer dicht als de juiste hoogte is bereikt. Laat de hoogte altijd checken door uw zorgprofessional! (Ons algemene advies: www.skylinemobility.com/nl/loopondersteuning/paraplustok/juiste-hoogte/)

Van 1 naar 2 producten

Open eerst de paraplu: schuif deze tot aan de stop omhoog zoals u gewend bent bij elke andere paraplu. Er verschijnt een knop op de paraplubuis waarmee de separate wandelstok kan worden uitgenomen. Met een druk op de knop trekt u de wandelstok er met een simpele beweging uit. Zo kunt u uw wandeling droog voortzetten zonder een tweede loophulpmiddel nodig te hebben. Bij mooi weer laat u de paraplu thuis.

Van 2 naar 1 product

Als u van uw separate wandelstok en paraplu weer een complete paraplustok wilt maken, steekt u de wandelstok gewoon weer in de paraplubuis. Bij een juiste boring van de knop in het gat hoort u een duidelijke klik. Roteer de buis iets als u de knop kwijt bent.


Antislipdop vervangen

Vervang de versleten rubberen dop voor meer grip. Trek de oude dop van de paraplustok en/of separate wandelstok en schuif het nieuwe onderdeel erop. Vraag uw winkelier om het juiste onderdeel met de bijbehorende afmetingen voor een goede passing. Let op: Zorg voor een metalen plaat in de dop ter bescherming van uw vloer. Scherpe delen kunnen anders in de rubberen dop achterblijven en de ondergrond beschadigen!

4. Gebruik

Het gebruik van een paraplustok kan zeer verschillend zijn en is afhankelijk van de individuele loopbeperkingen. Laat u daarom altijd instrueren door uw winkelier of zorgprofessional!

- Gebruik uw paraplustok niet in water. Maak uw wandelstok droog indien deze nat is geworden. Open de paraplu om het scherm te drogen en laat deze niet langdurig in de zon liggen.
- Het lopen met een paraplustok vergt enige oefening. Zorg dat u wordt ondersteund tijdens het eerste gebruik!
- Gebruik de loopondersteuning aan de kant van uw beste been!
- Gebruik de paraplustok altijd dichtbij uw lichaam, zo ervaart u de meeste steun!
- Plaats de paraplustok altijd recht op de grond, zodat deze niet uitglijdt!
- Pak de handgreep met volle hand volledig en stevig vast!
- Gebruik de armleuningen van de stoel bij het gaan zitten en staan!
- Draag -indien mogelijk- platte comfortabele schoenen. Uw been kan uw gewicht dan beter dragen!
- Mocht u vallen, zorg dan dat u niet op de loopondersteuning valt. Gooi deze bijvoorbeeld zijwaarts van u af.
- Raadpleeg uw zorgprofessional of uw paraplustok u ook kan helpen bij het traplopen. Houd een railing altijd met uw vrije hand vast. Let op: Trappen zonder leuningen vormen een verhoogd risico. Gebruik deze alleen met extreme voorzichtigheid.

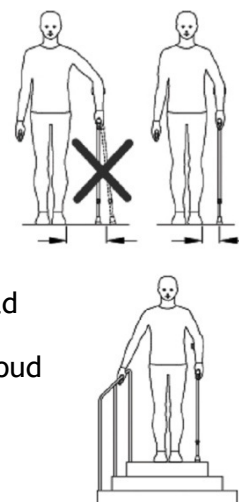

5. Voorzorgsmaatregelen

Door het gebruik van een loopondersteuning kunnen bepaalde lichaamsdelen ongebruikelijke belastingen ervaren. Dit kan de volgende ongewenste bijwerkingen veroorzaken:

Pijn in schouder, arm, pols en hand, overbelasting van het goede been en uitputting. Zorg voor voldoende pauzes om pijn, overbelasting en vermoeidheid zoveel mogelijk te voorkomen.

6. Opslag en onderhoud

- Bewaar de paraplustok nooit in de nabijheid van warmtebronnen zoals kachels en verwarmingen!
- Laat de paraplustok nooit voor een lange periode in de zon liggen. Sterke zonnestralen kunnen het kunststof aantasten!
- Bescherm uw paraplustok tegen omvallen en tegen lakbeschadigingen. Tip: Gebruik onze stokhouder!
- De rubberen dop is een slijtage-gevoelig onderdeel en moet af en toe vervangen worden!
- Laat uw paraplustok inspecteren als u deze voor een lange tijd (> 2 jaar) niet heeft gebruikt!
- Maak handgreep en rubberen onderdelen nooit schoon met vettige stoffen i.v.m. slipgevaar!
- Maak uw paraplustok schoon met een natte doek en indien nodig met een mild reinigingsmiddel!
- Gebruik geen bleek- of oplosmiddelen; deze kunnen de kunststof delen beschadigen!



7. Beperkingen

- Het maximale gebruikersgewicht voor de Twin Paraplustok is 100 kg. Een overschrijding van het toegestane lichaamsgewicht kan veiligheidsproblemen opleveren. Neem contact op met uw winkelier bij hogere belastingen of in geval van twijfel!
- Verbogen of beschadigde paraplustokken mogen onder geen enkele omstandigheid meer gebruikt worden. De vereiste sterkte en stabiliteit kunnen dan namelijk niet meer gegarandeerd worden. Neem contact op met uw winkelier voor vervanging van uw paraplustok!

8. Garantie

Op uw nieuwe paraplustok geldt een garantieperiode van 1 jaar. Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvorschriften, anders dan normaal gebruik, slijtage, onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals brand- en waterschade).

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling meegedeeld, behoudens dat wat door Ossenberg schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.

9. Afdanken

Raadpleeg uw lokale afvalinzamelingspunt bij het afdanken van uw paraplustok. Gooi het oude product dus niet zomaar in uw vuilnisbak!

10. Specificaties

Materialen:	Lichtmetaal, kunststof & polyester scherm met vuil- en waterafstotende Teflon behandeling
Gewicht:	245 gram (wandelstok) + 385 gram (paraplu)
Maximaal gebruikersgewicht:	100 kg
Hoogte:	In 5 stappen van 87 tot 95 cm (wandelstok: 85-93 cm)
Diameter paraplu:	105 cm
Handgreep:	Fritz Softtouch
Artikelnummers:	3034 (uni zwart) / 3060 (ruitdessin zwart-rood-wit)



Ossenberg GmbH

Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79

48432 Rheine
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0

Fax +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com

E-Mail info@ossenberg.com



Verdeler Benelux:

