

1

Ontgrendel de rolstoel middels de hendel en laat de voorwielen naar voren rollen.



2

Klap de rolstoel volledig uit door de rugleuning omhoog te tillen. U hoort een klik als de rolstoel is vergrendeld. Roteer het bovenste deel van de rugleuning naar achteren.



klik




3

Klap vervolgens de antitip wieltjes uit, zet de voetsteun omlaag en draai de joystick om.



Zet de rolstoel aan. De Smart Chair Travel is klaar om u rond te leiden!

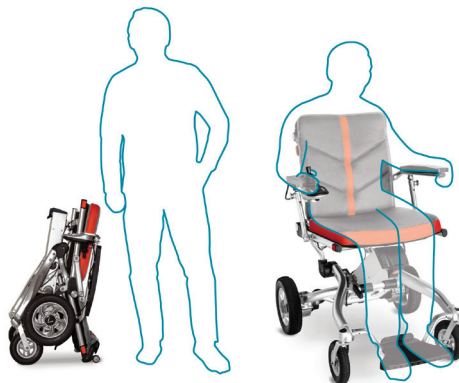

Smart Chair
Travel



1

Zet de rolstoel uit en de armleuningen op de laagste stand. Klap de antitip wieltjes in en roteer het bovenste deel van de rugleuning naar voren.



2

Ontgrendel de rolstoel door aan de kabel te trekken en roteer de rugleuning naar achteren.

3

Kantel vervolgens de gehele rolstoel naar achteren totdat deze zelfstandig rechtop staat. U hoort een klik als de rolstoel is vergrendeld.

4

Roteer de joystick en klap de voetsteun omhoog.



De Smart Chair Travel is nu compact op te bergen.




U kunt de Smart Chair Travel ook als trolley met u meerrollen.



klik



Plaats de optionele SmartRoll voor 40% gewichtsreductie. Zo weegt uw rolstoel nog maar 14 kg wanneer u deze in de kofferbak van uw auto tilt.

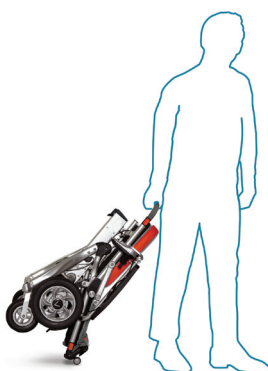

SmartChair Travel