



De rolstoel kan zowel staand (zie pagina 18 in de handleiding) als liggend worden uitgevouwen.



Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken tijdens het uitklappen van de rolstoel.

1

Klap de voetsteun neer en trek de safety lock uit om de stoel te ontgrendelen.



2

Door de rugleuning van de zitting weg te roteren, kan de rolstoel nu volledig worden uitgeklapt.

U hoort een klik als de uitgevouwen rolstoel is vergrendeld.



3

3

Klap vervolgens de armleuningen naar beneden en zet de antip wielletjes uit (zie pagina 22 in de handleiding).

Indien van toepassing: Zet de rolstoel in de rijstand (zie pagina 27 in de handleiding), plaats de accu (zie pagina 28 in de handleiding), de joystick (zie pagina 23 in de handleiding) en het zit- en rugkussen terug.

Stel eventueel de armleuningen af en monteer uw accessoires.



Zet de rolstoel aan. De Smart Chair Horizon is klaar om u rond te leiden!



Lees eerst de handleiding voordat u de rolstoel in gebruik neemt.



1



tip

U kunt het tilgewicht van de rolstoel verlagen door de accu, joystick en het zit- en rugkussen te verwijderen. Het helpt ook om het opbergvak van de rugleuning leeg te maken en eventuele accessoires te demonteren.

!

Zorg dat uw vingers en ledematen niet bekneld raken tijdens het inklappen van de rolstoel.

1

Zet de rolstoel uit (zie pagina 27 in de handleiding), klap de armleuningen op en klap de antitip wieltjes in (zie pagina 22 in handleiding).

2




2

Ontgrendel de rolstoel door in de ontgrendelhendel te knijpen.

Vouw vervolgens de gehele rolstoel op door de rugleuning naar beneden te duwen. U hoort een klik als de rolstoel is vergrendeld.

3

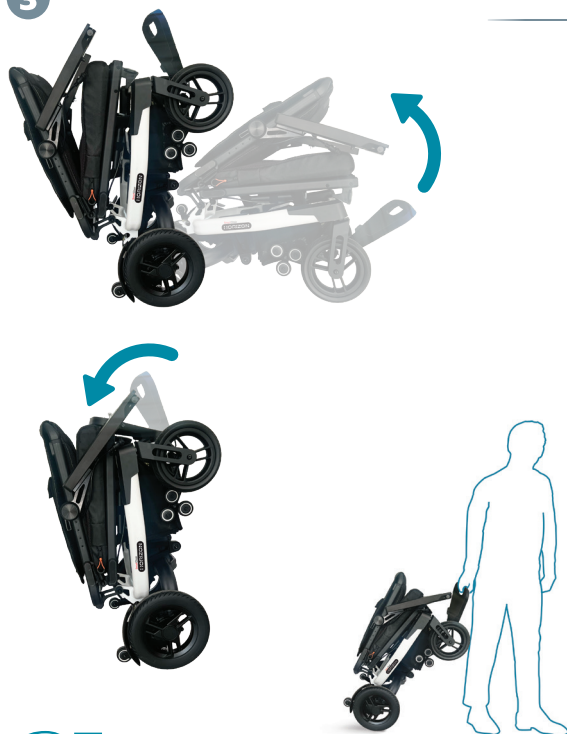

3

U kunt de rolstoel met behulp van de uitsparing in de voetsteun eventueel rechtop zetten.

Klap de voetsteun op en plaats de armleuningen nog iets naar beneden.

✓

De Smart Chair Horizon is nu compact op te bergen.

✓

U kunt de Smart Chair Horizon als trolley met u meerrollen. Zet hiervoor de vrijloophendels bij stap 1 al naar boven (zie pagina 27 in de handleiding).

✓

Gebruik de Smartroll om uw Horizon gemakkelijk in de kofferbak te rollen (zie pagina 31 in de handleiding).

!

Til de Smart Chair Horizon niet alleen als het tilgewicht voor u te zwaar is!

!

Til de rolstoel nooit op aan de bewegende delen. Zie ook andere transport veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 1 van de handleiding.